

# MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE PERSONALIZADA

Art. 3504



INFORME AITEX Nº2020TM4554

Ensayos basados en la norma EN 14683:2019+AC:2019.  
Tests according to the standard EN 14683:2019+AC:2019.

Habiéndose obtenido los siguientes resultados:  
Having obtained the following results:

ENSAYOS TEST	RESULTADOS ANTES DE LAVADO RESULTS AFTER WASHING ( Promedio ± DS ) ( Average ± DS )	RESULTADOS DESPUÉS DE 25 LAVADOS RESULTS AFTER 25 WASHING CYCLES ( Promedio ± DS ) ( Average ± DS )
<b>Pto 5.2.2</b> Eficacia de la filtración bacteriana (BFE)*% Bacterial Filtration Efficiency (BFE)*%	<b>99,80±0,31</b>	<b>95,31 ± 1,85</b>
<b>Pto 5.2.3</b> Respirabilidad. Presión diferencial*(PA/cm <sup>2</sup> ) Breathability.Differential pressure*(PA/cm <sup>2</sup> )	<b>45,8± 1</b>	<b>33,8± 1</b>

\*PRODUCTO FABRICADO EN ESPAÑA

### Materiales:


Capa exterior (100%poliéster),  
Capa intermedia (100%polipropileno),  
Capa interna (100%polipropileno)  
Pinza ajustable- Hilo de Acero recubierto de PVC

### Tamaños:

- 1 Infantil
- 2 Cadete
- 3 Adulto Mujer
- 4 Adulto Hombre

### Colores:

- Posibilidad color liso
- Posibilidad de personalización

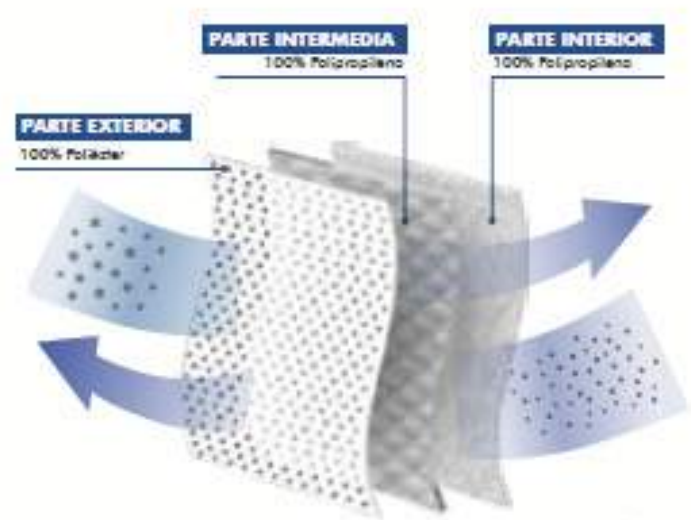

**3 CAPAS DE PROTECCIÓN**

## EMBALAJE / PACKAGING

# MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE

UNE 0065:2020

**3 CAPAS DE PROTECCIÓN**

ANTES DEL LAVADO  
BFE (Eficacia Filtración Bacteriana) 99,8 %  
PA/cm<sup>2</sup> (Presión Diferencial) 45,8

DESPUES DE 25 LAVADOS  
BFE (Eficacia Filtración Bacteriana) 95,31 %  
PA/cm<sup>2</sup> (Presión Diferencial) 33,8

**USO PREVISTO**  
EVITAR LA TRANSMISIÓN DE AGENTES INFECCIOSOS PROCEDENTES DE LA PERSONA QUE LA LLEVA PUESTA.

**INSTRUCCIONES DE USO**  
- LAVARSE LAS MANOS ANTES DE SU COLOCACIÓN.  
- COGER DE LA GORRA Y COLOCARLA DETRÁS DE LOS OÍDOS.  
- AGARRAR LA BANDA METÁLICA POR LA PARTE DEL DORSO.

**AJUSTE FACIAL**  
PIEZA FACIAL NO HERMÉTICA.  
EFECTOS DE AJUSTE NO REQUERIDOS.

**TIPOS/CLASIFICACIÓN**  
MASCARILLA REUTILIZABLE.

**LIMITACIONES DE USO**  
HASTA UN MÁXIMO DE 25 LAVADOS.

**PERIODO RECOMENDADO DE USO**  
POR CANTIDAD DE CONDICIONES E HÁBITOS DE USO.  
RECOMENDADO PARA LA MASCARILLA UN TIEMPO SUPERIOR A 4 H.

**POSIBILIDAD DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**  
- SE LAVARÁN EN MÁQUINAS.  
- INFORME DE LAVADO: 2020TM4554.

**INSTRUCCIONES DE LAVADO**  
SUMERGIR LAS MASCARILLAS EN UNA SOLUCIÓN DE LEJÍA 1:10 CON AGUA TIBIA DURANTE 30 MINUTOS.

**HOMOLOGADA LAVABLE/REUTILIZABLE**  
INFORME AITEX Nº2020TM4554

www.euredatextil.com